

# NOUVEAU Spinova® Immo Plus Classic

Orthèse de stabilisation dorso-lombaire et sacro-lombaire avec fonction mobilisatrice.



pelote ventrale



## Indications


- Spondylolyse / Spondylolisthèse
- Syndrome facettaire
- Spondylarthrose
- Syndrome lombaire (pseudo) radiculaire / ischialgie lombaire
- Sténoses lombaires du canal rachidien avec parèses (traitement conservateur, postop.)
- Sténoses foraminales, latérales
- Fractures stables (jusqu'à T10), soulagement du bord vertébral antérieur et/ou bord postérieur des vertèbres
- Tumeurs / métastases
- Post-opératoire

## Caractéristiques

- Les demi-coques en plastique de forme anatomique peuvent être ajustées selon la circonférence et la forme du bassin du patient.
- Le système de traction classique garantit une application thérapeutiquement correcte de la force ainsi qu'une mise en place pratique pour le patient.
- Les baleines du corset Spinova permettent une adaptation parfaitement anatomique à chaque patient.
- Le tricot Spinova aéré de la ceinture permet un ajustement anatomique précis pour un confort parfait.
- La fermeture abdominale auto-agrippante permet une adaptation rapide et facile.
- Le bord souple de la fermeture abdominale permet un grand confort même en position assise !
- Ouverture et fermeture faciles de l'orthèse grâce à de grands passants sur la fermeture abdominale.

## Mode d'action

- L'unité fonctionnelle formée par le système de traction classique et la coque entourant le tronc avec encadrement circulaire du bassin stabilise et soulage la colonne vertébrale lombaire.
- Les mouvements portant atteinte à la colonne vertébrale sont limités.

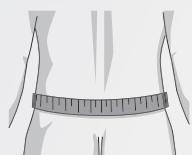

Taille	1	2	3	4	5	6	Référence
Tour de hanches en cm	70-80	80-90	90-105	105-115	115-125	125-140	1228564100000°
°= taille							

---

## Multifonctionnalité

---

- La construction modulaire de la Spinoва Immo Plus Classic permet une thérapie contrôlée selon un schéma de traitement à deux niveaux adaptables individuellement
- **Niveau 1 : (phase de stabilisation)**  
L'orthèse est employée avec la coque pour sécuriser efficacement les segments (traitement post-opératoire ou initialement conservateur)
- **Niveau 2 : (phase de mobilisation)**  
La coque est retirée afin d'augmenter la mobilisation suivant les progrès de la convalescence. Les baleines du corset Spinoва Classic continuent à garantir un soutien adapté à l'évolution du traitement.
- Repasser du niveau 2 au niveau 1 d'utilisation du Spinoва Immo Plus Classic est toujours possible.

