

Guide de soins  
pour les patients



Flaminal® Hydro et Forte

 Flaminal®

Votre professionnel de santé vous a prescrit Flaminal® Hydro et Forte pour une application à la maison. Veuillez suivre ces instructions d'utilisation. **Merci de lire attentivement les instructions.**

### AVANTAGES

- Aide à garder la plaie propre
- Garde la plaie humide et dans des conditions de cicatrisation idéales
- Flaminal® Hydro / Forte ne présente aucun danger pour la peau et les tissus de la plaie
- Protège les berges de la plaie
- Offre une protection contre les bactéries
- Réduit l'odeur de la plaie
- Aide la plaie à cicatriser

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser si vous avez une allergie connue à l'un des composants.
- Ne pas appliquer sur les paupières ou dans l'œil. Si le produit devait entrer en contact avec votre œil, rincez-le abondamment.



Plaies légèrement à modérément suintantes

Plaies modérément à fortement suintantes

Votre médecin vous conseillera Flaminal® Hydro ou Forte selon votre type de plaie.

 **Flaminal®**




### ÉTAPE 1

Veillez à vous **laver les mains** minutieusement avant et après toute application de Flaminal® Hydro / Forte.

**Nettoyez la plaie à l'eau claire** ou à l'aide d'un produit spécifique (p.ex. Flamirins®) pour nettoyer les plaies, suivant l'avis de votre infirmier/médecin.

S'il reste du **Flaminal®** d'une précédente application sur ou dans la plaie, et que vous ne parvenez pas à le rincer facilement, vous pouvez sans risque le laisser tel quel.

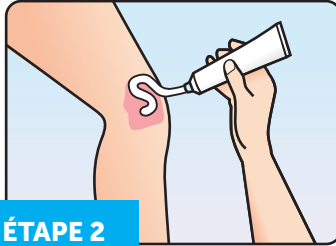


### ÉTAPE 2

Après avoir nettoyé la plaie, **appliquez une couche épaisse de Flaminal® Hydro / Forte d'environ 0,5 cm.**

Vous pouvez appliquer Flaminal® directement sur votre plaie ou utiliser un applicateur si vous en avez reçu un.

Essayez d'éviter que l'ouverture du tube ou que l'applicateur n'entre en contact direct avec la plaie.

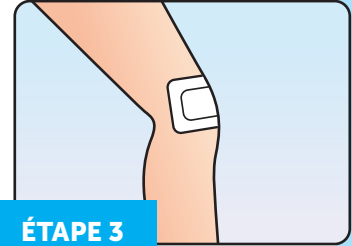

### ÉTAPE 3

**Couvrez votre plaie à l'aide d'un pansement adéquat** selon les recommandations de votre infirmier/ médecin.

Le type de pansement que vous utilisez dépend de l'état de la plaie. Est-elle sèche ou humide ?

- Pour les plaies humides, utilisez un pansement absorbant non adhésif.
- Pour les plaies plus sèches, utilisez un pansement non adhésif. Si votre plaie devient humide ou que le pansement commence à fuir après 24 heures, utilisez un pansement absorbant non adhésif.

**Changez votre pansement tous les 1 à 4 jours** ou, en cas de fuite excessive, selon les recommandations de votre infirmier/médecin. Voir la remarque.

### REMARQUE :

Durant les premiers jours du traitement, il est possible que vous ayez besoin de changer votre pansement plus souvent (tous les 1 à 2 jours). À mesure que l'état de votre plaie s'améliore, vous pouvez réduire les changements de pansement à tous les 3 à 4 jours, suivant les recommandations de votre infirmier/médecin.

Pour toute question concernant l'utilisation de Flaminal, veuillez contacter **medical@flenhealth.com** ou **03 825 70 63**.

Vous trouverez également de plus amples informations sur **www.flenhealth.com**

Pour toute question concernant vos soins ou votre plaie, nous vous recommandons de prendre contact avec votre infirmier ou médecin.



 **Flen Health**  
advanced skin healing

 **Flaminal**<sup>®</sup>